

Trusti Tuber,

Nouveau



TRUSTI TUBER

Le drenchage sans stress

de

TRUSTI TUBER (ANT01A)

CONCEPTION UNIQUE ET FACILITE D'USAGE

- Développé par un vétérinaire, le Trusti Tuber réduit significativement le stress et l'inconfort du veau. Le tube transparent doux et flexible s'ingère facilement, le veau se débat beaucoup moins, permettant un drenchage efficace et rapide.
- Embout rigide qui se maintient d'une seule main
- Capacité importante de 4 litres
- Tube flexible transparent permettant le contrôle de l'écoulement et facilitant le nettoyage
- Poignée ergonomique, parfaite pour mains larges ou petites
- Valve performante, pour un débit rapide même avec du colostrum épais
- Les tests indiquent une réduction de près de moitié du temps de drenchage

Dairy
Spares



Bague de blocage et
indication du poids
du veau pour un
positionnement
facilité du tube
flexible

Embout
sécurisé

L'embout rigide se place
confortablement contre le
museau

Le tube flexible s'enfonce au
travers de l'embout rigide pour
un positionnement facilité dans
l'œsophage

Support de l'embout sur la bouteille
pour le maintenir propre

Livré avec une tétine pour
une transition facile entre
biberon et drenchage

MODE D'EMPLOI



TRUSTI TUBER

1



L'embout rigide s'installe confortablement contre le museau.

2



Glissez le tube flexible au travers de l'embout rigide pour entrer dans l'œsophage.

Œsophage.

3



Bague de blocage et marqueurs de poids du veau pour un positionnement facilité.

Quand le tube flexible est bien placé dans l'œsophage il est possible de relever la bouteille.


REGLE IMPORTANTE

Ne jamais laisser s'écouler le liquide avant que le tube ne soit placé dans l'œsophage.

Pendant le drenchage:

Maintenir l'embout rigide en place tout au long du drenchage. Le tenir en même temps que le museau du veau, ainsi il suivra les mouvements éventuels de la tête. Ne pas laisser le tube flexible ressortir de plus de 2.5 cm durant l'écoulement. Ne jamais laisser le veau baisser sa tête au-dessous du niveau de son estomac.

4

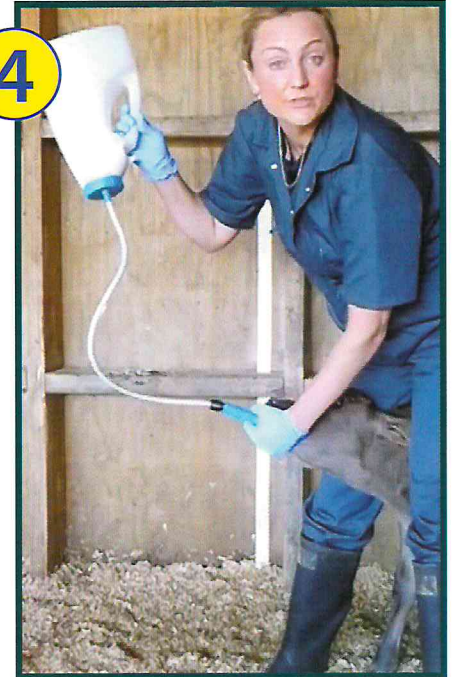

Retrait du tube:


Attendre au moins une seconde après que le liquide ait fini de s'écouler dans le tube puis le retirer doucement.

BAGUE DE BLOCAGE ET MARQUEURS DE POIDS:

- Veuillez considérer les marquages de poids du veau comme des longueurs minimales d'introduction du tube flexible à atteindre.
- La bague de blocage doit être positionnée à droite du marquage
- Ne sous-estimez pas le poids du veau car il vaut mieux introduire le tube plus loin que pas assez.



Si vous drenchez un groupe de veau, nous vous recommandons de régler la bague sur le poids du veau le plus lourd.

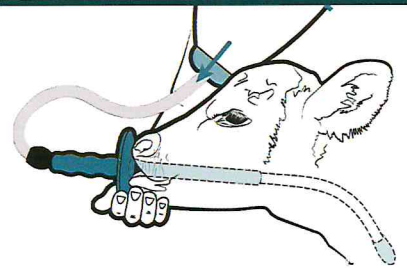

TRUSTI TUBER



ANT10A

Retrouvez nos vidéos de démonstrations
www.dairyspares.fr
et
www.antahi.com

**Dairy
Spares**

Dairy Spares SARL

4 rue de la Teillais - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Tél: 02 99 53 62 30

commercial@dairyspares.fr • www.dairyspares.fr

ANTAHI